

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik varav många kan produceras kundanpassat. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnadseffektivt sätt.

CureMed
NORDIC

GYENNO

MOTVERKAR SKAKNINGAR VID MÅLTIDER

Pris:
3 975 kr
inkl moms

Hjälpmidlet som balanserar bort ca 85% av skakningar och darrningar både lodrätt och vågrätt som gör det lättare att äta.


- Elektroniken i produkten balanserar bort skakningar/darrningar så att det blir mycket lättare att äta utan att spilla det man äter. Tryggare vid matbordet.
- Drivs med uppladdningsbart batteri.
- Laddningskabel medföljer. (USB-laddaren du sätter i vägguttaget följer inte med. Använd t ex den USB-laddare som du har när du laddar mobiltelefonen.
- En laddning räcker för ca 3 timmars användning.
- Produkten har "spagettifunktion" så att du kan få gaffeln att rotera under måltiden och på det sättet tvätta spagettin på gaffeln.
- Man byter enkelt mellan sked och gaffel.
- Sked- och gaffeldelen kan diskas i diskmaskin.
- Gyenno är CE-godkänd och används i många länder.

Passr den just mig? Prova så här:


- Ta ett A4-papper och klipp ett kvadratisk hål 7x7 cm i mitten.
- Be någon hålla pappret framför dig.
- Använd en sked/gaffel som du brukar använda när du äter och håll den utan mat i mitten av kvadraten.
- Försök hålla så stilla så kan.
- Om du har skakningar/darrningar så att du hela tiden kommer att vidröra väggarna på det kvadratiska hålet kommer produkten antagligen inte att hjälpa dig.
- Om du håller sked eller gaffel i mitten av kvadraten och inte vidrör väggarna eller bara gör det någon enstaka gång så kommer Gyenno special sked / gaffel att hjälpa dig på ett bra sätt.

Levereras i ett komplett kit som innehåller

- Handtaget med elektronikdelen • Gaffel • Sked • USB kabel
- Vristband att använda runt armen som säkerhet om du tappar skeden/gaffeln.

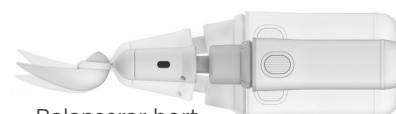

Balanserar bort skakningar

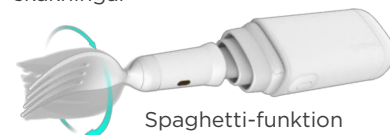

Spaghetti-funktion



Magnetisk kontakt



Inbyggt batteri



Sked- och gaffelfäste

Du kan se en demofilm på: curemednordic.se/product/gyenno

WWW.CUREMEDNORDIC.SE