

CureMed Nordic AB är ett svenskt medicintekniskt företag med huvudkontor och lager i Göteborg. I vårt sortiment finner ni världsledande produkter inom sjukvård och medicinteknik. Vårt mål är att alltid erbjuda sjukvården innovativa produkter från ledande producenter på ett kostnads-effektivt sätt.

GYENNO

MOTVERKAR SKAKNINGAR VID MÅLTIDER

Hjälpmidlet som balanserar bort ca 85% av skakningar och darrningar både lodrätt och vågrätt som gör det lättare att äta.


- Elektroniken i produkten balanserar bort skakningar/darrningar så att det blir mycket lättare att äta utan att spilla det man äter. Tryggare vid matbordet.
- Drivs med uppladdningsbart batteri.
- Laddningskabel medföljer. (USB-laddaren du sätter i vägguttaget följer inte med. Använd t ex den USB-laddare som du har när du laddar mobiltelefonen.
- En laddning räcker för ca 3 timmars användning.
- Man byter enkelt mellan sked och gaffel.
- Sked- och gaffeldelen kan diskas i diskmaskin.
- Gyenno är CE-godkänd och används i många länder.

Passar den just mig? Prova så här:

- Ta ett A4-papper och klipp ett kvadratiskt hål 7x7 cm i mitten.
- Be någon hålla pappret framför dig.
- Använd en sked/gaffel som du brukar använda när du äter och håll den utan mat i mitten av kvadraten.
- Försök hålla så stilla du kan.
- Om du har skakningar/darrningar så att du hela tiden kommer att vidröra väggarna på det kvadratiska hålet kommer produkten antagligen inte att hjälpa dig.
- Om du håller sked eller gaffel i mitten av kvadraten och inte vidrör väggarna eller bara gör det någon enstaka gång så kommer Gyenno special sked / gaffel att hjälpa dig på ett bra sätt.

Levereras i ett komplett kit som innehåller

- Handtaget med elektronikdelen • Gaffel • Sked • USB kabel
- Vristband att använda runt armen som säkerhet om du tappar skeden/gaffeln.

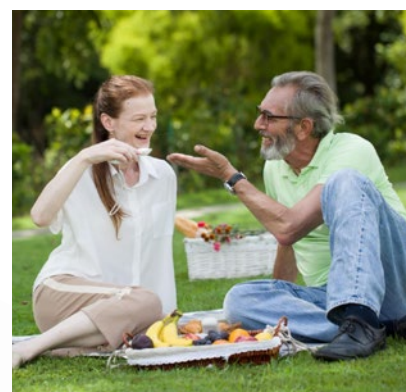

Balanserar bort skakningar



Magnetisk kontakt



Inbyggt batteri



Sked- och gaffelfäste